

STAY SAFE MN

PRUEBA DE SALIVA COVID-19 EN CASA

INSTRUCCIONES

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PASO A PASO Y RECUERDE QUE:

- Debe proporcionar la muestra bajo supervisión remota (videollamada por Zoom) para procesar su prueba.
- Debe abstenerse de comer, beber, mascar chicle o fumar 30 minutos antes de la prueba.

1

CREE O INGRESE A SU CUENTA EN [COVID.VLT.CO](https://covid.vlt.co)

Vaya a covid.vlt.co, utilice una dirección de correo electrónico válida y cree una contraseña que pueda recordar. Sólo tendrá que crear su cuenta una sola vez y utilizará las mismas credenciales para entrar si desea hacerse otra prueba en el futuro.

2

RECIBA SU KIT Y PREPÁRESE

No abra el paquete con el tubo de ensayo hasta llegar al paso 4. Hidrátese de 1 a 2 horas antes de hacerse la prueba para promover la producción de saliva. **Absténgase de comer, beber, mascar chicle o fumar 30 minutos antes de la prueba.**

3

CONOZCA A NUESTROS PROVEEDORES Y HÁGASE LA PRUEBA

Debe proporcionar su muestra bajo supervisión remota (videollamada por Zoom) para procesar su prueba. Para reunirse con su supervisor de la prueba Vault, visite covid.vlt.co e ingrese con las credenciales que proporcionó en el paso 1. El supervisor le guiará en el proceso de recolectar la saliva en el tubo. Este proceso sólo toma unas minutos.

4

ENVÍE EL KIT DE REGRESO Y RECIBA LOS RESULTADOS DE SU PRUEBA

Coloque la prueba en la bio-bolsa (bolsa para riesgo biológico) que se proporciona.

Lleve la bio-bolsa al lugar de entrega designado en su escuela.

Recibirá un correo electrónico de hello@updates.vaulthealth.com con los resultados entre 48 y 72 horas después que su prueba llegue al laboratorio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

SIGA LAS INSTRUCCIONES PASO A PASO

Debe proporcionar la muestra bajo supervisión remota (videollamada por Zoom) para procesar su prueba.

COMPATIBILIDAD DE NAVEGADORES WEB

Por favor, utilice Google Chrome o Safari para acceder a los portales de prueba de Vault Health. Internet Explorer no es un navegador compatible y su uso generará errores.

CUANDO RECIBA SU KIT

Lea el panfleto azul de instrucciones que se incluye en el kit de prueba.
No abra el paquete con el tubo de ensayo hasta que se le indique en la videollamada por Zoom.

ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA

Hidrátese de 1 a 2 horas antes de realizar la prueba.
Para obtener resultados precisos, no coma, ni beba, ni mastique chicle, ni fume los 30 minutos anteriores a la prueba.

EMPAQUE CORRECTAMENTE SU PRUEBA

Cuando haya terminado con la prueba, ponga el tubo en la bio-bolsa provista. Coloque la bio-bolsa en la caja blanca para proteger la muestra durante el tránsito.
Coloque la caja blanca en el empaque clínico provisto.

RESULTADOS POSITIVOS

Vault Health está obligado por ley a informar los casos verificados de COVID-19 a las autoridades de salud de su estado.
Si su resultado es positivo, visite [cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV) o comuníquese con su proveedor de atención médica.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA ADICIONAL? COMUNÍQUESE CON VAULT
212-880-5494 | covid@vaulthealth.com | vaulthealth.com/covid

VAULT
H E A L T H

m MINNESOTA

Departamento de Salud de Minnesota | health.mn.gov | 651-201-5000
625 Robert Street North PO Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975

Comuníquese con health.communications@state.mn.us para solicitar otro tipo de formato.

8/27/2020

2 de 2